

Great Lakes NOLA protractie headgear



Facemask headgear

300-306 Klein
300-307 Groot



Hickham headgear

300-308 Klein
300-309 Groot

BESTELINFORMATIE OP ACHTERZIJDE ►

Voordelen van NOLA protractie headgear:

- NOLA facemask headgear is eenvoudig aan te passen en heeft een comfortabele hoofdband.
- Hickham headgear is comfortabel te gebruiken tijdens het slapen, belemmert de kaakbeweging niet en is ook ideaal om overdag te dragen.
- NOLA protractie headgear is bedoeld om individuele tanden, groepen tanden of hele bogen naar voren te brengen. De headgear is volledig afstelbaar en biedt kinhouders in twee maten.

Suggesties voor behandeling:

Elastiekjes bevestigd aan de terminale tanden werken als Klasse III elastiekjes voor de bovenboog. Met andere woorden, ze openen de beet door deze tanden te extruderen. Het is daarom wenselijk om de elastiekjes aan het anterieure deel van de boog te bevestigen. Dit geldt vooral in gevallen van Klasse III waar de premaxilla omlaag en naar voren moet worden ontwikkeld in een normaal groeipatroon.

Soms zal de patiënt de eerste drie dagen dat de kinhouder wordt gedragen, overmatig transpireren. Het weefsel past zich aan en gewoonlijk stopt de transpiratie. Probeer het probleem niet te verhelpen door gaten in de kinhouder te boren voor luchtcirculatie. Er zal geen lucht door de gaten circuleren en de patiënt zal de vlekken op de kin niet waarderen als de kinhouder wordt verwijderd. Als de transpiratie aanhoudt, of de patiënt allergisch is voor acryl, zijn stoffen voeringen beschikbaar.

BELANGRIJKE HERINNERING VOOR ARTSEN! Om het risico op oogletsel te voorkomen, dient u de patiënten en ouders te informeren over de juiste veiligheidsvoorzorgen bij het aanbrengen en verwijderen van headgear. Waarschuw de patiënten ook voor ruw of riskant spel terwijl ze de headgear dragen.

ARTIKEL**BESTELNR.**

Protractie headgear en vervangingsonderdelen	
Klein facemask Groot facemask	300-306 300-307
Kleine Hickham Grote Hickham	300-308 300-309
Hoofdband voor Hickham (beide maten)	300-312
Voorhoofdband en borgmoeren voor facemask (beide maten)	300-313
Borgmoeren voor voorhoofdband (2/pak)	300-314
Kunststof beschermtips (10/pak)	300-316



Great Lakes[®]
DENTAL TECHNOLOGIES

200 Cooper Avenue, Tonawanda, New York 14150 USA
greatlakesdentaltech.com | 800.828.7626
Great People. Great Products. **Great Lakes.**