

Fascia nucale ad aggancio rapido Great Lakes NOLA

Posizionare l'estremità della fascia nel foro desiderato, poi premere o collocare ogni bottoncino successivo nel suo rispettivo foro mentre le fasce mantengono una posizione ricurva.

Plastica morbida modellata


Fasce completamente regolabili
Si adatta a ogni paziente
Nessuna pinzatura necessaria

Sei posizioni a scatto che offriranno un vettore di forza tra 10° e 40° al di sopra del piano di occlusione


Tubi a scatto da usare con i ganci a forma di J

Fasce elastiche a scatto da usare con gli archi facciali


I ganci a scatto e le imbottiture sono sostituibili (300-135)

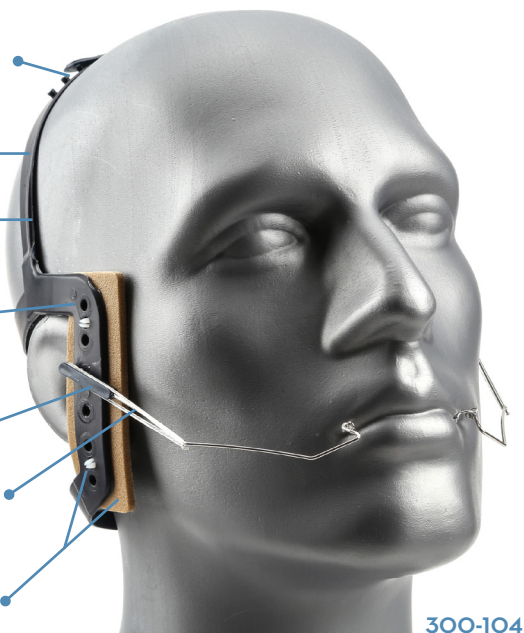

300-104

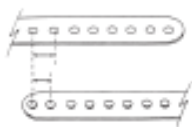

I fori delle fasce non sono disposti direttamente davanti ai bottoncini per cui quando li si fa scattare insieme, la fascia formerà una curva.

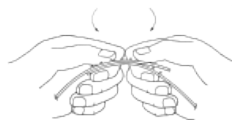

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI PRESENTI SUL RETRO ►

Il vantaggio di sicurezza del copricapo con i ganci a forma di J NOLA

Se confrontato con i dispositivi di strappo utilizzati con gli archi facciali attualmente disponibili, il copricapo con i ganci a forma di J è ugualmente sicuro o ancora più sicuro. Gli archi facciali sono potenzialmente pericolosi perché entrambi i lati sono collegati mantenendo le estremità dell'arco interno al centro del volto.

Inoltre, la gran parte dei dispositivi di strappo consente all'arco facciale di essere rimosso gradualmente dalla bocca prima che si raggiunga la forza di strappo.

Il gancio a forma di J presenta i seguenti vantaggi:

1. Il gancio destro e quello sinistro non sono collegati. Se uno dei due viene allentato, esso verrà tirato via dal volto.
2. Lo spostamento in avanti e indietro del gancio a forma di J è limitato dall'estremità ripiegata e dal gancio elastico saldato. (Fig. A)
3. La fascia nucale ad aggancio rapido fornisce un vantaggio aggiuntivo che permette di sganciare il tubo dalla fascia nucale nel caso si verificasse improvvisamente una forte trazione.



Fig. A

ARTICOLO	N. ORDINE
Fasce nucali, ganci a forma di J e accessori	
Fascia nucale a trazione variabile (5/pacco)	Nero 300-100 Blu navy 300-101 Marrone 300-102
Fascia nucale ad alta trazione (5/pacco)	Nero 300-107 Blu navy 300-103 Marrone 300-105
Fascia nucale ad aggancio rapido (5/pacco)	300-104
Gancio a forma di J per la retrazione dell'arco scorrevole/cuspide (5 paia/pacco)	300-121
Gancio a forma di J per la retrazione della bicuspide (5 paia/pacco)	300-122
Gancio a forma di J per la retrazione dell'arco scorrevole/cuspide: Lungo (5 paia/pacco)	300-123
Gancio a forma di J per la retrazione delle fasce nucali ad alta trazione (5 paia/pacco)	300-125
Gancio a forma di J per la retrazione delle fasce nucali ad alta trazione: Lungo (5 paia/pacco)	300-126
Tubi in acciaio inossidabile per la fascia nucale a trazione variabile (10/pacco)	300-131
Tubi a scatto per la fascia nucale ad aggancio rapido (10/pacco)	300-132
Ganci a scatto per la fascia nucale ad aggancio rapido (10/pacco)	300-133
Imbottiture in tessuto slip-on (20/pacco)	300-134
Imbottiture a scatto per tutte le fasce nucali (20/pacco)	300-135
Copricapo per la protrazione e pezzi di ricambio	
Face Mask Piccolo	300-306
Face Mask Grande	300-307
Hickham Piccolo	300-308
Hickham Grande	300-309
Fascia per la testa per il modello Hickham (entrambe le misure)	300-312
Fascia per la fronte e dadi di fissaggio per il modello Face Mask (entrambe le misure)	300-313
Dadi di fissaggio per la fascia per la fronte (2/pacco)	300-314
Punte protettive in plastica (10/pacco)	300-316

AVVISO IMPORTANTE PER I MEDICI! Per evitare il rischio di lesioni oculari, assicurarsi di aver informato i pazienti e i genitori in merito alle adeguate precauzioni di sicurezza quando si indossa e si rimuove il copricapo. Mettere in guardia i pazienti sui rischi derivanti da giochi violenti o pericolosi quando si indossa il copricapo.

