


Las máscaras faciales de tracción inversa de Great Lakes

Ajuste cómodo . . . Precio cómodo

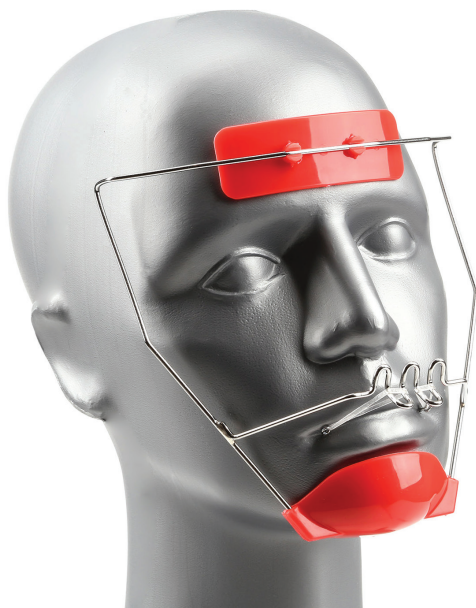

Para un solo uso

Disponible en color beige, azul, rojo, rosa intenso y morado y en tamaños pequeño, mediano y grande.

NÚMERO DE PEDIDO

Color	Pequeño	Mediano	Grande
Beige	GTS	GTM	GTL
Azul	GBS	GBM	GBL
Rojo	GRS	GRM	GRL
Rosa intenso	GPKS	GPKM	GPKL
Morado	GPRS	GPRM	GPRL

Estuche para aparatos extraorales disponibles

Negro.....830

El revestimiento de gel para la frente y mentonera maximiza la comodidad (SIN LÁTEX)

El revestimiento de gel lavable y reutilizable reduce eficazmente:

- Fricción
- Abrasión
- Fuerza de corte
- Presión

Descanso de la frente

- Más grande para mejorar la comodidad del paciente.
- Los clips resistentes a roturas se sujetan de forma segura al marco.
- Moldeado de plástico ligero.

Arco bucal

- Alambre de calibre 0.075.
- Mayor estabilidad y potencial de tensión.
- Se utiliza con su elección de anclaje intraoral.

Mentonera

- Moldeada en función del marco para eliminar la rotación.
- Diseño de copa más grande para mejorar la comodidad del paciente.
- Moldeada de plástico ligero.

Gracias a la construcción ligera de acero inoxidable y el ajuste adecuado de la cara, se ha eliminado la necesidad de correas para la cabeza.

Visibilidad total

- No hay obstrucciones visuales.
- Se puede utilizar con gafas.

Puntos de ajuste

- Garantiza un ajuste perfecto a cada rostro, independientemente de su forma.

Función

- Clase III: Tracción hacia adelante para llevar el arco maxilar hacia adelante.
- Clase II: Tracción hacia adelante de la mandíbula. Excelente para llevar los dientes hacia adelante (uno o una sección).

Bandas elásticas:

Bandas elásticas pesadas sin látex de 5/16"
7.9 mm - 8 oz (100 por paquete)

Bandas elásticas:

No se pueden vender en Canadá.

Instrucciones de ajuste personalizado

(A) PRUEBAS Y AJUSTES

(B) Para que permanezca en su lugar mientras duerme, la máscara facial debe ajustarse bien al contorno de la frente y las mejillas. Los ajustes deben hacerse utilizando una pinza de ajuste en los puntos A y/o B.



*Pinza de ajuste 220-022

(C) Ajuste para adaptarse a la medida de la cara. La almohadilla debe estar por encima de las cejas para conseguir el máximo contacto con la superficie, lo que permitirá que el paciente pueda hablar sin mover la máscara facial.

(D) Evite que el aparato presione el pómulo.

(E) Alinee la máscara del arco bucal directamente con los dientes y ligeramente por debajo de la línea de la boca. Esta ligera presión hacia arriba mantendrá la máscara facial con más firmeza en su lugar.

(F) Puede ser necesario un ligero ajuste hacia arriba o hacia abajo para acomodar la posición mandibular de cada persona y/o la musculatura del mentón.

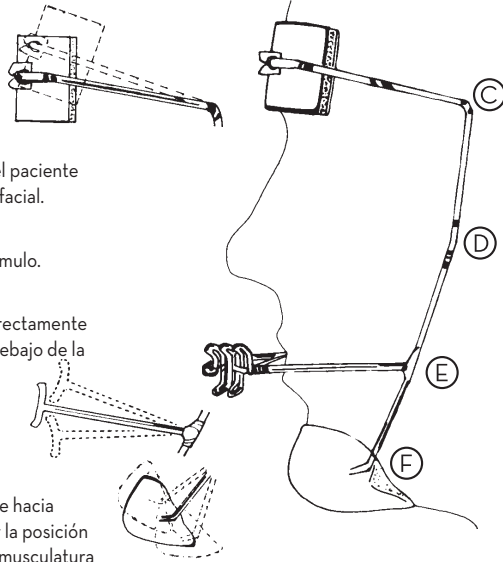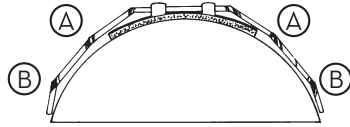

Máscara facial de tracción inversa

La máscara facial de tracción inversa se diseñó inicialmente para el tratamiento de insuficiencias maxilares y prognatismo mandibular. Cuando nuestros clientes realizaron aplicaciones adicionales para la tracción hacia adelante de la máscara (clase II y espacios de cierre) se realizaron ajustes. Se añadió una mentonera para mejorar la estabilidad. El marco se modificó para evitar que se mueva incluso al dormir. El arco bucal se rediseñó para aumentar el potencial de tensión y lograr una seguridad óptima para el paciente.

Las devoluciones después de 30 días están sujetas a un cargo de reposición del 15% a menos que el artículo se dañe durante el envío o se haya enviado uno erróneo. Esto no se aplica a los aparatos personalizados.

¡RECORDATORIO IMPORTANTE PARA LOS MÉDICOS!

Para evitar el riesgo de lesiones oculares, asegúrese de informar a los pacientes y padres sobre las medidas de seguridad adecuadas al ponerse y quitarse la máscara. También advierta a los pacientes de que deben evitar los juegos bruscos o riesgosos mientras llevan puesta la máscara.



Great Lakes[®]
DENTAL TECHNOLOGIES

200 Cooper Avenue, Tonawanda, New York 14150
greatlakesdentaltech.com | 800.828.7626
Great People. Great Products. Great Lakes.